


# Manual de instrucciones

## Rampa para silla de ruedas

30120, 30121, 30122, 30123, 30124

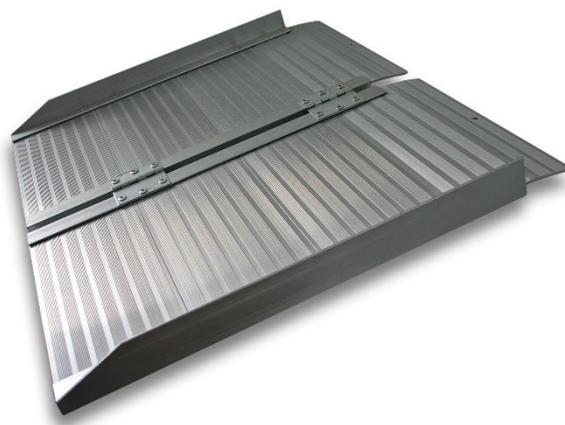

Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.

## Instrucciones de seguridad

- La carga máxima de esta rampa son 270 kg (el peso tiene que ser distribuido igualmente sobre los 2 ejes). Nunca sobrepase la carga máxima indicada.
- Nunca sobrepase el límite de altura indicado.
- Preste atención y tenga cuidado al cargar y descargar.
- Cargue y descargue solamente en superficies estables y duras.
- Asegúrese de que no haya personas no autorizadas en la zona de carga. **¡Riesgo de lesiones!**
- No dejar rampas instaladas sin supervisión.
- Tenga cuidado con las zonas desplegadas. **¡Riesgo de lesiones por contusiones!**
- Expuesta al agua, la rampa se vuelve resbaladiza. **¡Peligro de deslizamiento!**
- Pliegue y asegure la rampa antes de cada transporte.
- La rampa no es un juguete. Úsela solamente para el uso previsto. No usar como trampolín, escalera, puente o a algo similar no previsto.
- Asegúrese de que los bordes de la rampa están fijados y no se dejen mover. Use los tornillos adjuntos al suministro para fijar la rampa.
- Haga caso a las instrucciones de su silla de ruedas o silla eléctrica al usar la rampa

## Instrucciones de uso

### *Carga de una silla de ruedas*

- Posiciona la silla de ruedas con la rueda de adelante en frente de la rampa. Roda o empuja la silla de ruedas lentamente y con una velocidad constante hacia arriba. Tenga nota que las ruedas estén en la mitad de la rampa.
- Cuando llueve, tenga cuidado que las ruedas no se deslicen.

### *Descarga de una silla de ruedas*

- Posiciona la silla de ruedas con las ruedas de atrás en la rampa. Deje que la silla de ruedas rode lentamente hacia abajo.
- Usar la rampa solamente en compañía de otra persona cualificada.

## Mantenimiento

- Revisa la rampa y todas sus componentes antes de cada uso. Si se nota cualquier fallo, la rampa no se debe usar.
- Limpie la rampa a menudo. Las bisagras siempre tienen que estar engrasadas.

## AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.