

Mode d'emploi

Table de massage

61175-61177

toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : service@wiltec.info
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction


Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité

- Entretenez régulièrement la table de massage. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le câble n'est pas endommagé ou effiloché. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures dans la structure du bois.
- Ne pas surcharger le tableau au-delà de la limite de charge recommandée. Cela peut causer des dommages aux matériaux en vinyle. Utilisez de l'eau chaude savonneuse et essuyez-la.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base d'alcool pour nettoyer le vinyle. Cela peut causer des dommages aux matériaux en vinyle. Utilisez de l'eau chaude savonneuse et essuyez-la.
- Veillez à ce que les quatre pieds soient posés sur une surface ferme et à la même hauteur lorsque vous utilisez la table.

Installation de la table de massage

- Placez la table sur le côté, desserrez les boucles, ouvrez partiellement la table et enlevez les accessoires.
- Saisissez les deux poignées de la table tout en vous tenant derrière celle-ci et déplacez doucement la table vers l'extérieur pour l'ouvrir complètement. Les jambes doivent s'ouvrir automatiquement.
- Faites pivoter la table en la soulevant. Appuyez dessus au milieu pour vous assurer que la table est bien à plat. Si elle est surélevée au milieu, vérifiez le câble et alignez-le.

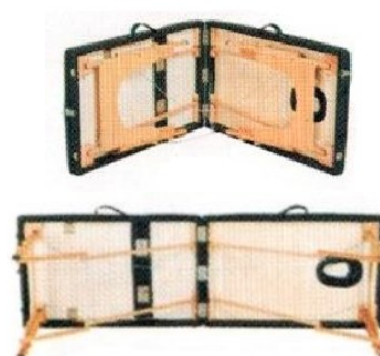

Utilisation de la table et des accessoires

Nous vous proposons des accessoires optionnels. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avec de mettre en service la table de massage.

Repose-tête

Le repose-tête se compose d'une base d'appui-tête en forme de croissant et d'un coussin facial en forme de croissant. Il permet à votre client de bénéficier d'un soutien confortable pour sa tête et son visage. Vous pouvez avoir une variante différente pour la base de l'appui-tête. Le repose-tête réglable est facile à monter. Changez l'angle et la hauteur de la base en ajustant la poignée de la base.



Base d'accoudoir réglable

Cet accoudoir réglable est un bon dispositif pour soutenir les bras de votre client à l'avant de la table. Accrochez la tablette de l'accoudoir sur les deux barres du repose-tête et faites glisser la sangle vers le haut ou vers le bas pour obtenir la position optimale.



Extension latérale du bras

Votre nouvelle table de massage est équipée d'une extension latérale des bras. Ces accoudoirs latéraux amovibles et rembourrés offrent une surface de couchage optimale. Ils s'insèrent dans les trous d'accessoires correspondants de chaque côté du canapé. Cela permet à vos clients de bénéficier d'un soutien confortable au niveau des bras, en particulier pour les gros clients.

Réglage de la hauteur

La bonne hauteur de couchage est déterminée par la taille du thérapeute, la modalité et la technique. Vous pouvez régler la hauteur en retirant le bouton de chaque jambe. Remettez les boutons en place après avoir déplacé chaque jambe dans la position souhaitée.

Limite de charge du canapé (poids)

- Le positionnement du client au milieu de la table permet de répartir le poids de manière uniforme et d'assurer la stabilité. Asseyez-vous d'abord avec précaution près du centre de la table (et non pas directement sur le centre), puis aussi près que possible du centre (depuis le bord). Le poids de travail est le poids combiné du client et de la pression maximale que le thérapeute peut exercer vers le bas. La capacité de charge maximale de la table est de 150 kg.
- Par exemple, pour un client pesant 80 kg, la pression maximale à la baisse qui peut être appliquée sans danger est de 70 kg. Comme la pression à un angle latéral exerce une pression beaucoup plus forte sur la table, la pression latérale maximale ne doit pas dépasser 50 % de la pression maximale vers le bas.
- **NE DÉPASSEZ JAMAIS LE POIDS MAXIMAL INDIQUÉ !** Ne dépassez jamais les limites de charge de la table ! Dans le cas contraire, des blessures et/ou des dommages graves peuvent survenir !

Stockage

- Fixez la base du repose-tête et le coussin facial à élastique sous la table, comme indiqué. Placez chaque accessoire dans sa position d'origine comme indiqué dans l'illustration.
- La housse de transport doit être utilisée lors du transport ou du stockage de la table afin de la protéger d'éventuels dommages. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, stockez celle-ci dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. N'exposez pas la table à des températures ou à une humidité extrêmes (chaudes ou froides).



Enveloppe de la table



Soin

Coussins

- **Nettoyage quotidien** : Enlevez la saleté et la crasse quotidiennes de la table avec une solution d'eau savonneuse douce et chaude. Essuyez avec un chiffon doux et non pelucheux.
- **Désinfection** : Désinfectez la table selon les besoins avec un nettoyant hospitalier à base d'iso-propanol (approuvé pour une utilisation sur du polyuréthane-vinyle).
- **Élimination des taches** : Certaines petites taches peuvent être enlevées avec un nettoyant doux et non abrasif. Vaporisez du nettoyant sur un chiffon humide et essuyez soigneusement les taches, rincez abondamment la zone à l'eau chaude et séchez avec un chiffon doux non pelucheux. Les taches plus tenaces peuvent nécessiter un nettoyage professionnel.

Bois

Votre table de massage est faite de bois dur sélectionné et est recouverte de vernis, de sorte qu'elle ne nécessite pas de soins particuliers. Si vous le souhaitez, vous pouvez occasionnellement polir avec des produits d'entretien du bois de haute qualité.

Instructions de montage pour repose-tête et accoudoir

1. Insérez les bras tubulaires du repose-tête dans les boucles des deux sangles de l'appui-bras.
2. Insérez les bras du tube dans les trous du repose-tête dans la table et verrouillez la position avec le levier de verrouillage de l'appui-tête.
3. Ajustez l'accoudoir à la position horizontale souhaitée et serrez toutes les sangles en conséquence.
4. Fixez l'oreiller au repose-tête à l'aide du velcro fourni.



Utilisation de votre appui-tête réglable dans 6 directions

1. Insérez les bras tubulaires du support facial dans les ouvertures.
2. Positionnez le levier de verrouillage de manière à ce qu'il s'étende horizontalement vers l'extérieur avec les rainures en haut.



3. Réglez l'appui-tête comme vous le souhaitez et abaissez le levier pour le verrouiller. Gardez la table sèche et évitez de l'utiliser dans des environnements humides ou mouillés. Si la table est mouillée, il faut la sécher rapidement et soigneusement avec un chiffon doux.

Réglage de la hauteur de la partie arrière

- Après avoir retiré le verrou à l'extrémité, vous pouvez soulever la planche arrière. Ajustez-la à la position désirée.
- Après avoir réglé la planche arrière à la hauteur maximale, remettez la fixation en place.



Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.